


ENFit™ Flergangssprøjter (D-3NTERAL™)

VASKEANVISNING

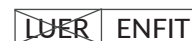

Efter første anvendelse er ENFit Flergangssprøjter (D-3NTERAL™) ikke længere sterile og må derfor ikke anvendes til flere end én patient.



1. Rengør sprøjten direkte efter anvendelse. Undgå at lade sonde-ernæring eller medicinrester forblive og tørre i sprøjten, da dette forkorter sprøjtenes levetid.




2. Tag hele stemplet ud fra hylsteret. Det er ikke nødvendigt at tage den sorte gummiring af stemplet.

3. Vask begge dele (stempel og hylster) grundigt med varmt vand og rengøringsmiddel (opvaskemiddel eller lign.) for at fjerne alle eventuelle mad- eller medicinrester.

4. Skrub/skrab **ikke** på sprøjten, da dette vil forkorte dens levetid.

5. Skyl stempel og hylster omhyggeligt under koldt rindende vand fra hanen eller i en skål med rent vand i.

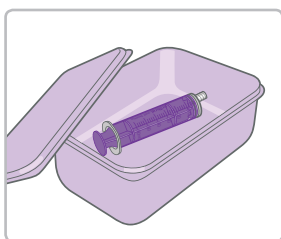

6. Ryst overskud af vand ud og lad derefter alle dele lufttørre.

7. Tør **ikke** delene med papir, håndklæde eller lign., da dette vil forkorte sprøjtenes levetid.

8. Saml stempel og hylster, når delene er tørre og opbevar sprøjten på et rent og tørt sted. Undgå at opbevare sprøjten i direkte sollys.



9. Sprøjterne kan anvendes i op til 7 på hinanden følgende dage.

Sprøjterne skal kasseres når enten:

- Markeringen bliver utydelig eller begynder at forsvinde.
- Stemplet bliver trægt at bruge.
- Sprøjten har været brugt i 7 dage.

ENFit flergangssprøjter (D-3NTERAL™) distribueres af Nutricia.