

ANVENDELSE AF FLOCARE® PACK GRAVITY ERNÆRINGSSÆT

- 1 Vend **forsigtigt** flasken med sondeernæring. Undgå **dannelse af bobler**.
- 2 **Vip låget** på flasken med sondeernæring **op**.
- 3 Tag **Flocare® Gravity ernæringssettet** ud af pakken og **tilslut** det til flasken med sondeernæring. Dette gøres ved at skubbe den plusformede ende af ernæringssettet ned i den plusformede indgang på flasken, så flaskens indvendige folie brydes. Skru ernæringssettet fast.
- 4 **Luk klemskruen** på Flocare® Gravity ernæringssettet.
- 5 **Fold** løkken på flasken med sondeernæring **ud og hæng** flasken op på et dropstativ.
- 6 **Klem dråbekammeret** på Flocare® Gravity ernæringssettet et par gange til det er en tredjedel fyldt.
- 7 **Åbn nu klemskruen** på Flocare® Gravity ernæringssettet og **fyld ernæringssettet med sondeernæring**.
- 8 **Luk klemskruen**, når Flocare® Gravity ernæringssettet er næsten fyldt.
- 9 **Fjern proppen** fra enden af Flocare® Gravity ernæringssettet. Tilslut ernæringssettet til sonden ved at skru dem sammen.
- 10 **Åbn gradvist klemskruen** på Flocare® Gravity ernæringssettet indtil den ønskede indgivelseshastighed opnås.



Indgivelseshastighed

Antal dråber pr. minut x 3 = Antal ml pr. time eller $\frac{\text{Antal ml pr. time}}{3} = \text{Antal dråber pr. minut}$

Dråbe/minut	ML/time	Indgivelsestid for 1/2 liter	Indgivelsestid for 1 liter
20	60	8 timer 20 min.	16 timer 40 min.
30	90	5 timer 35 min.	11 timer 10 min.
40	120	4 timer 10 min.	8 timer 20 min.
50	150	3 timer 20 min.	6 timer 40 min.
60	180	2 timer 45 min.	5 timer 30 min.
70	210	2 timer 20 min.	4 timer 40 min.
80	240	2 timer 5 min.	4 timer 10 min.
90	270	1 timer 50 min.	3 timer 40 min.
100	300	1 timer 50 min.	3 timer 20 min.

1 ml = 20 dråber

Skyl med 20 – 50 ml væske før og efter hver indgivelse eller mindst hver 8. time. Tjek flasken med sondeernæring jævnlgt for at sikre, at indgivelseshastigheden er korrekt, og at flasken ikke tømmes fuldstændigt. Skift Flocare® Gravity ernæringsæt efter 24 timer.

