

# FLOCARE® INFINITY™ GO RYGSÆK

**Rygsæk til Flocare®  
Infinity™ ernæringspumpe,  
ernærings sæt og sonde-  
ernæring. Udviklet til den  
mobile patient – let at tage  
med.**

Rygsække til Flocare® Infinity™ ernæringspumpe, ernærings sæt og sondeernæring. Udviklet til den mobile patient og er let at tage med. Rygsækkene er stabile og kan stilles på nat-/sengebord indeholdende stativ, Pumpe og sondeernæring. Rygsækkene kan desuden anvendes som håndtaske, skuldertaske og kan fikseres på en kørestol. Let at rengøre og kan vaskes i maskine ved 40 grader. Rygsækkene fås i to varianter: en sort voksenrygsæk til både 500 ml og 1000 ml sondeernæring (er også velegnet til børn) og en rød/blå børnerygsæk til 500 ml sondeernæring.




## FLOCARE® INFINITY™ GO RYGSÆK:

### Beskrivelse

- Praktiske justerbare stropper i nylon.
- Højde: Voksenrygsæk: 34 cm (til 500 ml og 1000 ml sondeernæring), Børnerygsæk: 31,7 cm (til 500 ml sondeernæring).
- Fremstillet af letaftørreligt nylon. Udstyret med to ydre rum.
- Bagsiden er ergonomisk udformet og giver god komfort.
- Justerbar brystrem og taljebælte.
- Nylonrem med spænder til fastgørelse af sondeernæringen.
- Særskilt plads i stativet til fastgørelse af Flocare® Infinity™ pumpen.
- Åbning i siden til ernæringssettet.
- Passer til både flaske, pose og container.
- Vægt: 1820 g (inkl. Flocare® Infinity™ pumpe + stativ + 500 ml sondeernæring).

### Brugervejledning

1. Lyn låsen på forsiden af rygsækken op.
2. Anbring pumpe og sondeernæring i stativet. Sondeernæring fastgøres med rem og spænde.
3. Anbring stativet med pumpe og sondeernæring i rygsækken.
- 4A. Anbring ernæringssettet i lommen på stroppen.
- 4B. Åbn lynlåsen på forsiden og før ernæringssettet ned i rygsækken.
- 4C. Før ernæringssettet ud gennem åbningen på siden og tilslut sonde eller gastrostomikateter/knapsonde.
- 4D. Åbn den lille lomme på forsiden for at starte pumpen.
5. Ved vask – åbn lynlåsen inde i rygsækken og tag polstringen ud, inden du vasker rygsækken.
6. Rygsækken kan hænges op på kørestol, barnevogn eller seng med skulderremmen.

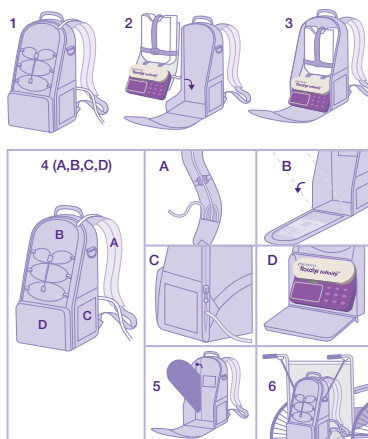

### Vaskeråd

Flocare® Infinity™ Go rygsækken er lavet af nylon og kan tørres af med en fugtig klud – brug varmt vand. Anvend ikke kemikalier! Kan maskinvaskes ved 40 grader.



### VIGTIGT:

Når pumpen kører, skal **Flocare® Infinity™ Go rygsækken** holdes opret. Sondeernæringsemballagen hænger derved lige op og ned, hvilket gør, at sondeernæringen flyder jævnt.

For yderligere information se [www.nutriciaflocare.com](http://www.nutriciaflocare.com)

### VAREINFORMATION

Produkt navn	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® Infinity™ Go rygsæk, voksen (sort)	44497	1 stk.
Flocare® Infinity™ Go rygsæk, barn (rød/blå)	44496	1 stk.
<b>Relateret produkter</b>		
Flocare® Infinity™ Universal Frame til rygsæk	188229	1 stk.
Flocare® Infinity™ pumpe	40409	1 stk.
Flocare® Infinity™+ pumpe	40435	1 stk.
Flocare® Infinity™III pumpe	121825	1 stk.

### Relateret produkter



Flocare® Infinity™ Universal frame (stativ) til rygsæk



Flocare® Infinity™ pumpe



Flocare® Infinity™ III pumpe