


FLOCARE® TWIN-LINE INFINITY™ ERNÆRINGSSÆT

Engangs enteralt ernæringssæt til brug med Flocare® Infinity™ pumpe. Fri for DEHP og andre phthalater.

Flocare® Infinity™ Twin-Line ernæringssæt til brug for enteral ernæring med ernæringspumpe. Flocare® Infinity™ Twin-Line tillader indgivelse af to slags sondeernæring eller sondeernæring og sterilt vand samtidigt. Kan også anvendes sammen med Top Fill Reservoir til at tilføje vand til den sondeernærede patient, som ikke behøver at få sterilt vand eller til administration af opløste pulverblandinger. Med den lilla farve adskiller Flocare® Infinity™ Twin-Line ernæringssæt sig tydeligt fra parenterale ernærings-systemer. Alt Nutricias plastmateriale er fri for phthalater.

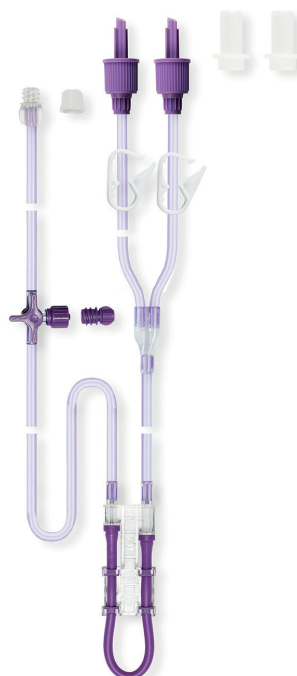

FLOCARE® INFINITY™ TWIN-LINE ERNÆRINGSSÆT

Består af

- A: ENPlus spike konektor til sondeernæringsflaske, sterilt vand eller Top Fill reservoir
- B: Aflukningsklemme, der giver mulighed for at klemme af til sondeernæring, sterilt vand eller Top Fill Reservoir
- C: Flocare Infinity pumpesegment
- D: 3-vejs hane til indgivelse af medicin og gennemskylning (med støvhætte)
- E: ENFit konektor

Materiale

PVC-godkendt til medicinsk brug, fri for phthalater.

Emballage

Enkeltvis sterilt pakket.

Holdbarhed

36 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på pakningen.

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur.

Brugstid

24 timer.

Indgivelse

Ernæringssettet tilkobles beholderne (sondeernæring, sterilt vand og/eller Top Fill reservoir). Sørg for, at de to (A) ENPlus-spike konnekter er i samme højde, og undgå knæk på ernæringssettet mellem beholderne og pumpen.

1.: Indgivelse fra én beholder ad gangen. Brug (B) aflukningsklemmerne til at bestemme hvilken beholder, pumpen skal trække indhold fra.

EKSEMPEL: Indgivelse af 100 ml vand, derefter 250 ml sondeernæring og til sidst 100 ml vand. Indstil pumpen til 450 ml samt ønsket indgivelseshastighed. Afklem først til ernæringen, og åbn for vandet. Når 100 ml vand er indgivet, afklemmes til vandet, og åbnes til ernæringen. Til sidst åbnes for vandet og afklemmes til ernæringen igen.

2.: Indgivelse fra begge beholdere samtidig. Åbn begge (B) aflukningsklemmer.

EKSEMPEL: Indgivelse af 1000 ml vand og 1000 ml sondeernæring samtidigt. Indstil pumpen til 2000 ml samt ønsket indgivelseshastighed.


Vær opmærksom på, at en beholder kan tømmes lidt hurtigere end den anden beholder pga. forskel i viskositet. Hold derfor altid øje med indgivelsen og brug aflukningsklemmerne, hvis den ene beholder tømmes hurtigere end den anden. Dette vil også forhindre luft i ernæringssettet.

For yderligere information se www.nutriciaflocare.com

Flocare® Infinity™ Twin-Line ernæringssett opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.

VAREINFORMATION

Produkt navn	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® Infinity™ Twin-Line	86518	30 stk.
Relaterede produkter		
Flocare® Infinity™ pumpe	40409	1 stk.
Flocare® Infinity™+ pumpe	40435	1 stk.
Flocare® Top Fill Reservoir 1,3 liter	70139	10 stk.

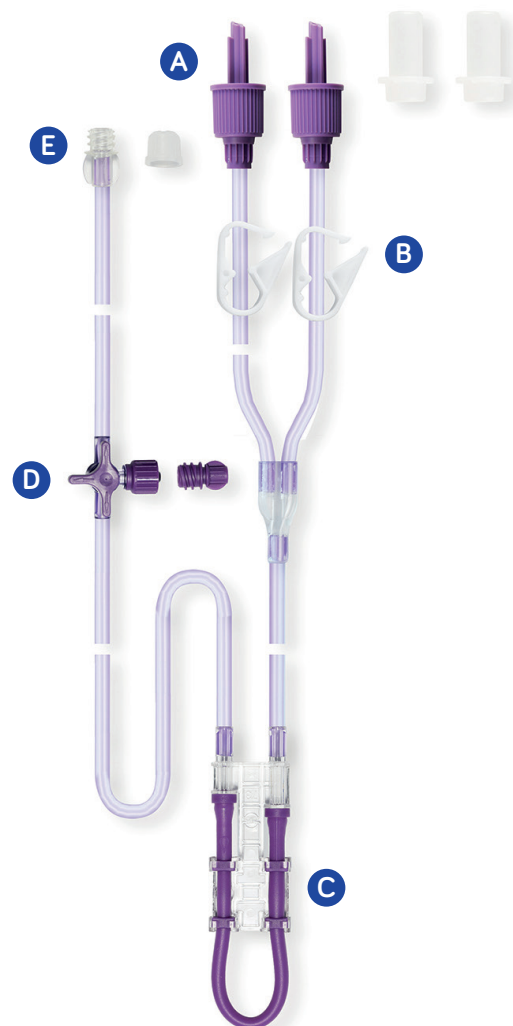

Relaterede produkter



Flocare® Infinity™ pumpe



Flocare® Top Fill Reservoir