

FLOCARE® INFINITY™ III

Enteral ernæringspumpe til både stationær og mobil brug. Pumpen har et enkelt og brugervenligt design samt høj nøjagtighed og sikkerhed.

Flocare® Infinity™ III har en intuitiv brugerflade med ergonomisk udformede knapper og velkendte symboler, samt en stor og letlæselig farveskærm. Pumpen gemmer automatisk en 30-dages historik, der vises grafisk. Man kan således zoome ind på historikken dag for dag.

Det er enkelt at montere ernærings sæt af mærket Flocare® Infinity™ i pumpen. For optimal sikkerhed, er lækken på Flocare® Infinity™ ernærings sæt designet til kun at kunne sættes i pumpen på én måde. En animation i venstre hjørne af skærmen gør det nemt at se, hvornår pumpen kører, mens en statuslinje på skærmen viser, hvor langt pumpen er med det program, den er indstillet til.



FLOCCARE® INFINITY™ III:

Sikkerhed

For at sikre optimal patientsikkerhed, er **Flocare® Infinity™ III** udstyret med fem sensorer, og pumpen afgiver tydelige visuelle og hørbare alarmer og advarselsmeddelelser hvis der opstår problemer, såsom flowstop eller betydelig luft i ernæringssettet. Pumpen alarmerer desuden ved påmindelse om igangsætning samt når det indstillede indgivelsesprogram er færdigt. Lyden på alarmerne for færdigt program kan slås til og fra. Informationsknappen angiver årsagen til alarmerne.

Rengøring

Pumpen kan skylles under rindende vand, og er således nem at rengøre, hvilket reducerer risikoen for, at rester af sondeernæring giver grobund for bakterievækst.

Instruktioner

Sammen med pumpen følger en brugervejledning på flere forskellige sprog samt en quickguide på dansk. **Flocare® Infinity™ III** må kun anvendes i kombination med ernæringsæt af mærket Flocare®.

Teknisk information

- Kan programmeres i volumeninterval: 1-3500 ml
- Indgivelseshastighed: 1-600 ml/t i 1 ml intervaller
- 30-dages historik med detaljer dag for dag
- IP25 – kan rengøres under rindende vand
- Infusionsnøjagtighed +/- 5%
- Vægt: 434 g
- Størrelse: 149 x 119 x 49 mm
- Lithium-ion batteri
 - 24 timers batterilevetid ved 125 ml/t
 - Ca. 6 timers genopladningstid
- Farveskærm
- Mulighed for at indstille lydniveau
- Mulighed for at indstille lysniveau samt mulighed for automatisk nedblænding af lyset
- Forebyggende serviceinterval: senest hvert 5. år
- Inspektion: producenten anbefaler kraftigt, at pumpen undergår lokal inspektion hvert 3. år. Denne inspektion kan udføres af dertil oplærte personer. Se endvidere brugervejledningen.
- Programmeringsmuligheder:
 - Volumen-Rate (Dosering)
 - Rate (Kontinuerlig)
 - Intermittent (Bolus)
- Mulighed for programmering af personligt program
- Indeholder "Information"-knap til hjælp og yderligere information om pumpen
- Indeholder "Home"-knap, så det altid er muligt at navigere tilbage til startskærmen

Til administration af enteral ernæring.

For yderligere information se www.nutriciaflocare.com

FLOCCARE® INFINITY™ pumperne opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.

VAREINFORMATION

Produktnavn	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® Infinity™ III	121825	1 stk.

